

L'ALLIANCE DE LA RAPIDITÉ ET DE LA PRÉCISION

Profitez maintenant de la réfraction en 3 minutes à 0,25D

Choisissez le programme personnalisé à 0,01D ou à 0,25D en fonction de votre client


- Expérience client unique
- Protocoles «smart programs» accompagnent la réfraction du début à la fin
- Algorithmes d'assistance pour une réfraction facilitée
- Réfracteur à lentilles à focales variables pour une réfraction plus directe

NOUVEAU

Réfraction à 0,01D :
Programmes "Precise"

+

Réfraction à 0,25D :
Programmes "Fast & Secure"

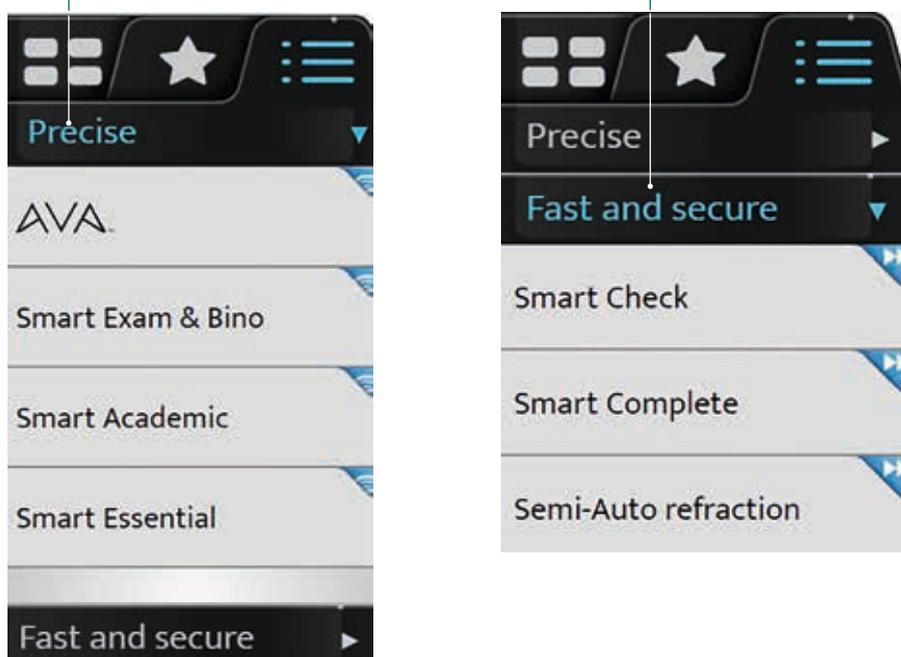

Les nouveaux programmes*

- Réfraction rapide sans brouillage /débrouillage
- Réfraction rapide avec brouillage /débrouillage
- Réfraction semi-automatique guidée

*Pour en savoir plus, consultez le document « Guide de démarrage rapide Vision-R 800 programme Smart Complete (à 0,25D) » sur essishop.fr
Retrouvez toutes les informations utiles des produits sur essishop.fr et les formations à l'utilisation sur leonardo.essilorluxottica.com

RAPPEL SUR LA FONCTION PVP*

LE TEST PVP PERMET D’AFFINER LA RÉFRACTION EN UNE PRESCRIPTION PRÉCISE EN L’AJUSTANT DE LA VALEUR DE SENSIBILITÉ DIOPTRIQUE DU CLIENT.

C’EST L’ÉTAPE DE L’ÉVALUATION PERCEPTUELLE.



9 à 12 : Réfraction OG



NOUVEAU : TEST PVP

Les points clés :

- 1 Ce test se réalise à la fin de la réfraction en vision de loin.
- 2 Réalisez comme d’habitude la réfraction de votre client sur le Vision-R 800 en effectuant au moins deux smart tests** pour calculer la sensibilité dioptrique du client.
- 3 Lors de l’étape PVP, demandez au client de se concentrer sur l’horloge et vérifiez qu’elle est nette et confortable avec la réfraction en cours.

Pendant que le client regarde l’horloge, variez la réfraction du pas de sensibilité personnalisée du client en commençant par du « + » puis « - » si nécessaire comme vous l’auriez fait avec une face +/- 0,25 dans la méthode traditionnelle.

Une fois ce point atteint, vous obtenez la prescription finale.
- 4 Ce nouveau test est disponible sur tous les programmes Smart et AVA sauf Smart Essential.

*Pour en savoir plus, consultez les documents « Guide de démarrage rapide Vision-R 800 programme AVA (à 0,01D) » et « Smart Program AVA opticien » sur essishop.fr

**Deux smart tests autres que “brouillage” et “dérouillage” permettent de déterminer la sensibilité dioptrique du client. Les smart tests sont reconnaissables grâce au symbole bleu dans le coin supérieur droit.

Retrouvez toutes les informations utiles des produits sur essishop.fr et les formations à l’utilisation sur leonardo.essilorluxottica.com



45 / 47, bd Paul Vaillant-Couturier
94200 IVRY-SUR-SEINE

0 979 990 310 Service & appel gratuits

E-MAIL : scinstr@essilor.fr
essilor-pro.com/fr

EssiShop.fr



Puisque des améliorations sont régulièrement apportées, les spécifications et illustrations présentées dans ce document ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées sans avis préalable. Essilor International, SAS au capital de 277.845.100 €, 147 rue de Paris - 94220 Charenton-le-Pont - RCS Créteil 439 769 654. 12-2023 - Réf: MAJVR8001223.